

녹 의: 제17 - 130호

2017년 06월 26일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 원에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -




1. 검사정보 변경

검사명	기존 검사	대체 검사	비고
Urea Brea.Test (Helifinder) (GC Labs 코드: E404)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Urea Brea.Test(Helifinder) (GC Labs 코드: E404) · 참고치: Negative: Difference < 2.00 · 검체 채취 방법: <ol style="list-style-type: none"> ① 동봉된 캡슐을 물 50mL와 함께 복용 ② 복용 후 20분 후에 두번째 유리병 (청색 튜브)에 호흡 채취 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Urea Breath Test 요소호흡 (GC Labs 코드: C410) · 참고치: Negative: Difference < 4.00 · 검체 채취 방법: <ol style="list-style-type: none"> ① 분말이 든 용기에 물 75mL를 가하여 잘 녹인 후 복용 ② 복용 후 30분 후에 두번째 유리병 (청색 튜브)에 호흡 채취 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: 기존 시약(헬리파인더) 공급 부족으로 대체시약(헬리포스) 병행 안내 · 적용일: 06월 28일 접수분 ※ 별첨: Urea Breath Test 호흡 검체 채취 방법 및 주의사항

의료법인 녹십자의료재단



Urea Breath Test 호흡 검체 채취 방법

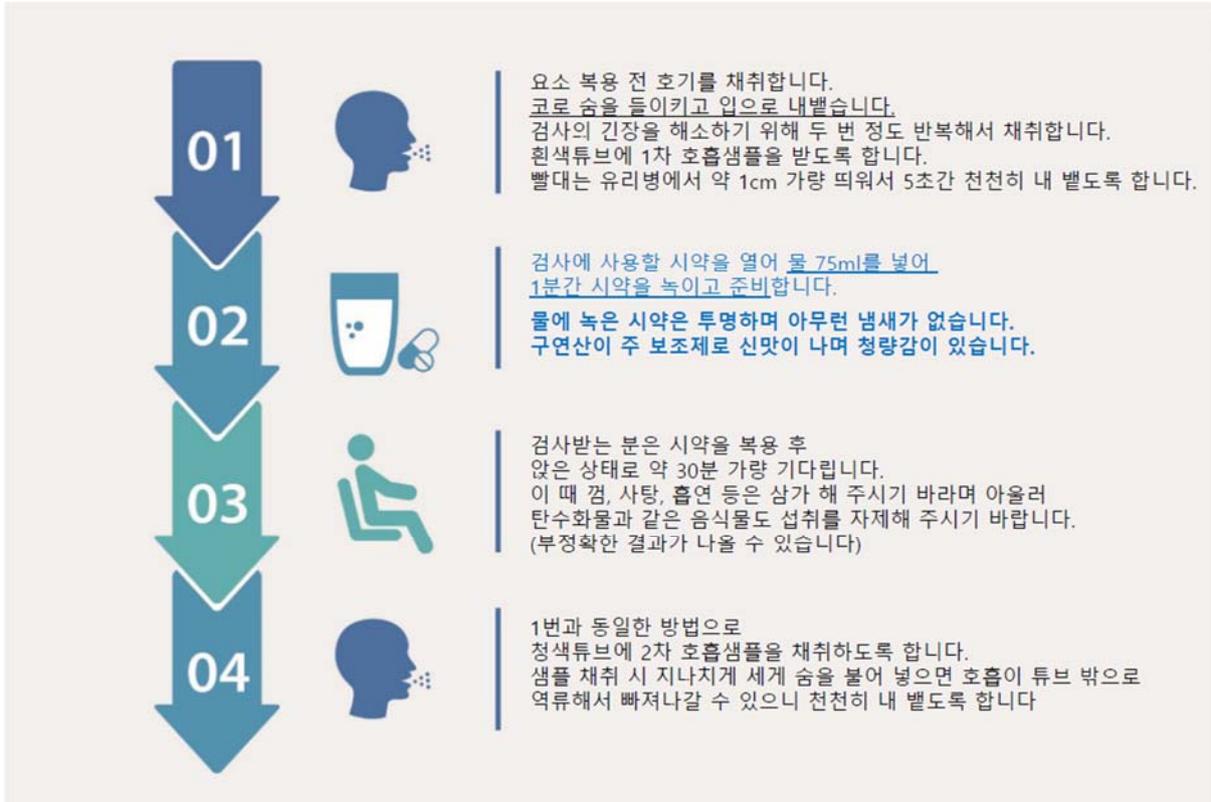

주의사항

<샘플 채취시 주의사항>

- 1) Screw cap을 비틀어지게 닫으면 시료가 샐 우려가 있습니다.
- 2) 지나치게 세게 돌려서 고무가 찌그러진 경우에도 호흡 시료 채취에 실패할 수 있습니다.
- 3) 지나치게 세게 숨을 불어 넣으면 호흡이 유리병 밖으로 역류하여 빠져 나갈 수 있습니다.

<적용상의 주의>

- 1) 동봉된 빨대는 날숨 채취용으로만 사용한다.
- 2) 날숨 채취시 깊은 호흡은 피하고 평상시 호흡하듯이 숨을 내쉰다.
- 3) 검사 진행동안 조용히 안정을 취한다.
- 4) 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 않는다.

<다음 환자에게는 투여하지 말 것 >

- 1) 임산부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 2) 이 약의 성분에 대한 과민반응의 기왕력이 있었던 자

<다음 환자에게는 신중히 투여할 것>

- 1) 본 약물에 대한 과민반응의 기왕력이 있었던 자
- 2) 2주 요소호기검사를 받은 적이 있는 자
- 3) 페닐케톤뇨증으로 진단받은 자
- 4) 천식, 폐렴, 만성폐색성 폐질환 또는 다른 폐질환이 있는 자